

Montageanleitung Stockhalter



In Ihrem Paket ist folgendes enthalten:


- Stockhalter
- Köcher
- 2x Schraube kurz
- 1x Schraube lang
- 3x Mutter

Zur Montage benötigen Sie noch folgende Hilfsmittel:

Inbus; Stärke 2,5

Inbus; Stärke 3

Ihren Stockhaltern können Sie links oder rechts montieren.

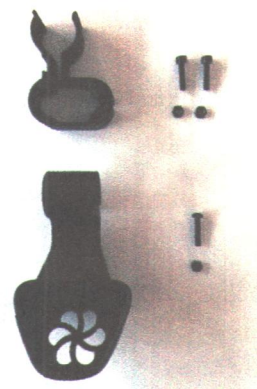


Montage des Stockhalters:

Schritt 1:

Klippen Sie den Stockhalter an die Schiebbestange.

Die Höhe können Sie selbst bestimmen.

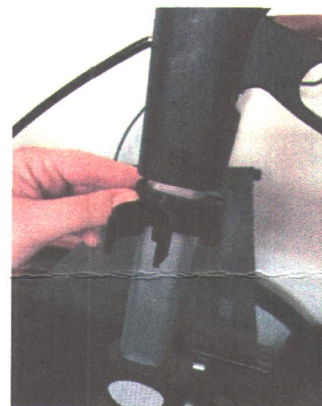

Schritt 2:


Zur Befestigung des Stockhalters, nehmen Sie bitte eine der kurzen Schrauben und eine Mutter. Mithilfe des Inbus der Stärke 3 ziehen Sie die Schraube fest.



Schritt 3:

Mit der zweiten kurzen Schraube stellen Sie die Größe des Clips ein. Je fester Sie die Schraube ziehen, desto schmaler wird der Clip und hält so auch dünnere Stöcke.

Hierzu verwenden Sie nochmal den Inbus der Stärke 3.

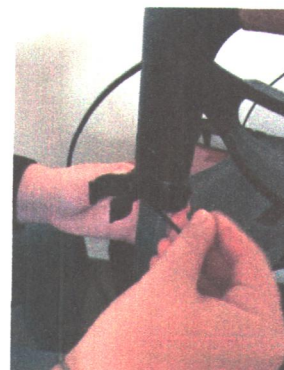

Montage des Köchers:

Schritt 1:

Klipsen Sie den Köcher von unten an die Stange. (siehe Bild)



Schritt 2:

Drehen Sie den Köcher nach außen.



Schritt 3:

Legen Sie die Mutter von außen in die dafür vorgesehene Aussparung. Bringen Sie nun den Köcher in die gewünschte Endposition und befestigen Sie diese mit der langen Schraube von innen.

Hierzu benötigen Sie den Inbus der Stärke 2,5.



Sie haben es geschafft!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Carbon Rollator.

Ihr SALJOL-Team

