

814025

Krykkeholder, TOPRO Troja
Crutch holder, TOPRO Troja
Stockhalter, TOPRO Troja

| | | |
|-----------|-------------|---------------------------|
| Innhold: | 1x 716008 | Krykkeholder, kopp |
| | 1x 716009 | Krykkeholder, øvre del |
| | 1x 814025M1 | Monteringsveiledning |
| Contents: | 1x 716008 | Crutch holder, cup |
| | 1x 716009 | Crutch holder, upper part |
| | 1x 814025M1 | Mounting instructions |
| Inhalt: | 1x 716008 | Stockhalter, unterer Teil |
| | 1x 716009 | Stockhalter, oberer Teil |
| | 1x 814025M1 | Montageanweisung |



1. Monter øvre feste . Plasser holderen på rammebrakett og press den helt ned til du hører et "klikk". (Se bilde)
1. Mount the upper bracket to the frame bracket. Press it down until you hear a "click".. (See picture)
1. Die obere Befestigung wird angebracht. Plasieren Sie die Befestigung in die Rahmenhalterung und drücken Sie sie ganz nach unten. (Siehe Bild)



- 2.1 Monter nedre holder som vist på bilde. Før tapp på holder inn i hull i koblingsstykke.

2.2 Vri holderen med klokka til det høres et "klikk".

- 2.1 Mount the cup to the frame bracket. Put the tap on the cup into the hole in the frame bracket.

2.2 Twist the bracket 90° clockwise until you hear a "click."

- 2.1 Montieren Sie die untere Befestigung wie auf dem Bild gezeigt. Führen Sie den Stift an der Schale in das Loch in dem Verbindungsstück.

- 2.2 Drehen Sie die Befestigung mit den Uhrzeigersinn, bis ein "Click" zu hören ist.



3. Plasser krykken i koppen. Press deretter krykken inn i øvre feste.
3. Put the crutch into the cup, thereafter, press the crutch into the upper bracket.
3. Placieren Sie den Stock in die Schale. Drücken Sie nun den Stock in die obere Befestigung.

- Merk! Krykkeholderen kan festes på begge sider av rullatoren.
- Remarks! The crutch holder can be mounted on both sides of the Walker.
- Hinweis! Der Stockhalter paßauf den beiden Seiten des Rollators