

# DINO

## DUSCHHOCKER - SHOWER STOOL

ART.-NR. / REF.: 550 500 100



### Gebrauchsanweisung - Operating instructions

#### Indikation – Indication

Duschhilfen sind Duschsitze, Duschhocker, Dusch-stühle, Duschliegen und fahrbare Duschliegen, die ausschließlich für den häuslichen Bereich bestimmt sind. Duschhilfen kommen für Personen in Betracht, deren physische Funktionseinschränkungen die tägliche Körperpflege unter der Dusche ohne weitere Anwendung von Hilfsmitteln nicht mehr erlauben. Duschhilfen sind dann indiziert, wenn die Stand-sicherheit des Anwenders eingeschränkt ist. Liegt auch eine Minderung der Sitzstabilität (z.B. Lähmungen im Rumpfbereich) oder eine Schwäche beim Hinsetzen /Aufstehen vor, müssen ggf. Rückenlehne und Seiten-lehnen vorhanden sein. Ggf. ist auch der Einsatz von Duschliegen erforderlich.

Shower aids are suitable for persons who are not able to shower without medical devices. In case of instability in standing. In case of reduced stability in sitting or weakness when sitting down or standing up, back-rest and armrest must be used.

#### Lieferumfang – Scope of delivery contents




**Stuhl komplett -**  
Shower stool complete

#### Montage – Assembling

Duschhocker ist komplett gebrauchsfertig montiert.

Shower stool is completely assembled for use.

#### Höhenverstellung der Beine – Height adjustment of legs 34 - 52 cm

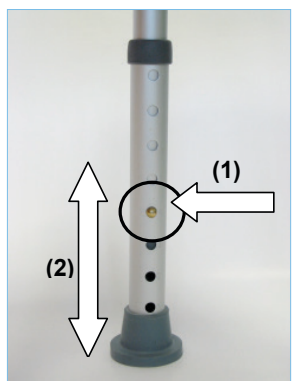

**Vor Benutzung den Duschhocker auf die gewünschte Höhe einstellen.**

**Für die Höhenverstellung der Beine: Knopf drücken (1) und gleichzeitig das Bein herausziehen bzw. einschieben bis der Knopf in der gewünschten Position einrastet (2). Versichern Sie sich, dass der Druckknopf richtig eingerastet ist.**

**Stellen Sie sicher, dass alle vier Beine auf die gleiche Höhe eingestellt sind.**

Before use, adjust height of each leg to your specific needs.

For height adjustment of legs:  
Press pin (1) and simultaneously pull or push leg to the desired height. When it is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.(2). Make sure that the pin locked correctly into place by pushing down on or by pulling leg.

Make sure that all legs are adjusted at the same height

SICHERHEITSHINWEISE	SAFETY INSTRUCTIONS
<b>Duschhocker bei Defekt nicht verwenden!</b>	Do not use the shower stool if it is damaged!
<b>Vorsicht - Abrutsch-/Absturzgefahr!</b>	Danger of falling!
<b>Maximale Belastung: 130 kg</b>	Maximum load: 130 kg

WIEDEREINSATZ	REUSE
<b>Der Duschhocker ist, nach sicherheitstechnischer Prüfung durch den Fachhandel, für den Wiedereinsatz geeignet.</b>	The shower stool is suitable for further use after technical check by a specialized dealer.

REINIGUNG/WARTUNG	CLEANING/MAINTENANCE
<b>Keine Scheuermittel verwenden!</b>	Do not use abrasives!
<b>Von Hand mit einem feuchten Tuch reinigen!</b>	Clean by hand with a damp cloth!

GARANTIE	WARRANTY
Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum	We issue a warranty of 24 months from date of purchase.
Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten.	Subject to technical alterations.

Technische Daten - Technical Data		
MASSE	DIMENSIONS	ART.-NR. / REF.: 550 500 100
<b>Maximale Belastung</b>	Maximum load	130 kg
<b>Durchmesser Sitzfläche</b>	Diameter seat	32 cm
<b>Gesamtbreite</b>	Width over all	45 cm
<b>Höhe Sitzfläche</b>	Height seat	2,7 cm
<b>Höhenverstellung</b>	Height adjustment	8fach – 8 steps: 34 - 52 cm
<b>Farbe</b>	Colour	weiß – white
<b>Gewicht</b>	Weight	1,6 kg
<b>Material Beine</b>	Material legs	Aluminium, silber eloxiert (rostfrei) – Aluminium
<b>Material Clipverschluss</b>	Material clip lock	Messing – brass
<b>Material Sitz</b>	Material seat	Kunststoff (PP) – high quality plastic (PP)

**Ihr Fachhändler – Your specialist Dealer:**