

Gebrauchsanleitung

Beistell-Tisch »De Luxe«

Art.-Nr. 11211 000 weiß
 Art.-Nr. 11211 100 Buche Dekor

PHV-Nr. 50.45.04.0012



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Der Beistelltisch ist dafür vorgesehen in Verbindung mit einem Kranken- oder Pflegebett verwendet zu werden. Er dient sowohl Anwendern als auch Patienten und Pflegebedürftigen in der täglichen Pflege-Praxis als wertvolle Unterstützung z. B. bei der Körperpflege, beim Essen und Trinken im Bett oder auch bei therapeutischen Maßnahmen.

⚠ Sicherheitshinweise ⚠

- Überzeugen Sie sich vor der Benutzung von der Funktionsfähigkeit, Stabilität und dem ordnungsgemäßen Zustand des Beistell-Tisches und des Zubehörs!
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität und die Festigkeit des Produktes und ggf. den festen Sitz der Schrauben!
- Beachten Sie unbedingt die maximale mittige Belastbarkeit des Beistell-Tisches von 15 kg bei horizontaler Positionierung!
- Lehnen Sie sich nicht auf den Beistell-Tisch oder stützen sich auf den Beistell-Tisch auf!
- Verwenden Sie den Beistell-Tisch nicht als Aufrichtehilfe aus dem Liegen!
- Bremsen Sie im Stand immer alle vier Laufrollen!
- Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen – Klemm- und Kippgefahr!
- Vermeiden Sie den Kontakt von heißen Gegenständen mit der Tischplatte!

Kontraindikation

Es bestehen keine Kontraindikationen.

Lieferumfang

Fahrgestell, Standsäule (L-Stange), Tischplatte, Seitenplatte, Drehknopf rund für Gewinde (für Höhenverstellung), Drehknopf dreieckig (für Neigung Tischplatte), 4 Räder mit Bremsen, 2 Schrauben klein, 1 Schraube groß, 1 Flügelmutter, 2 Unterlegscheiben Metall, 2 Unterlegscheiben Plastik

Montage

1. Die 4 Rollen in die dafür vorgesehenen Löcher des H-förmigen Fahrgestells klicken, bis sie fest eingerastet sind.
2. Die Standsäule (L-Stange) mit den 2 kleinen Schrauben, 2 Unterlegscheiben aus Metall und der Flügelmutter so auf dem Fahrgestell festschrauben, dass die Räder nach innen unterhalb der L-Stange liegen. (Abb.1)
3. Die Tischplatte mit dem der Öffnung des Rohres auf die Standsäule (L-Stange) schieben. Zur Fixierung die lange Schraube mit den 2 Unterlegscheiben aus Plastik durch das Lochblech für die Winkeleinstellung und die Öffnung an der L-Stange stecken und mit der Flügelschraube festdrehen. (Abb. 2)
4. Zur Höhenverstellung den runden Drehknopf in die vordere Öffnung an der Standsäule (L-Stange) stecken und festdrehen.
5. Zum Anbringen der kleinen Seitenplatte diese links oder rechts von der großen Tischplatte in die viereckige Öffnung stecken und mit der integrierten Flügelschraube festdrehen.

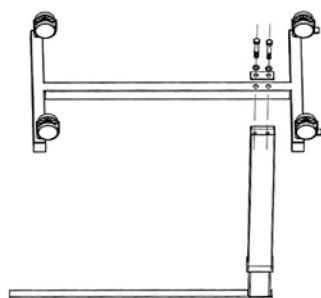


Abb. 1

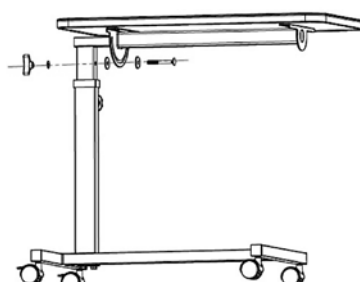


Abb. 2

Anwendung

Einstellen des Beistelltisches:

1. Einstellen des Neigungswinkels der Tischplatte

Zum Verändern des Neigungswinkels drehen Sie mit der einen Hand die schwarze Flügelschraube an der Seite und stellen mit der anderen Hand die gewünschte Neigung der Tischplatte ein.

2. Höhenverstellung der Tischplatte

Die Höhe der Tischplatte kann stufenlos zwischen 70 und 105 cm verändert werden. Dazu lösen Sie die den runden Drehknopf durch Drehen nach links. Ziehen Sie die Mittelstange bis zur gewünschten Höhe nach oben bzw. nach unten und fixieren Sie diese Position durch Festdrehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn.

3. Fixieren der Standposition

Sie stellen den Beistell-Tisch fest, indem Sie mit Ihrem Fuß die Rollbremse der Laufrolle nach unten drücken. Die Bremse können Sie durch einfaches Hochdrücken des Bremshebels wieder lösen.

Reinigung

Der Beistell-Tisch ist nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt. Für die manuelle Reinigung ist ein material-schonender Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem DGHM-/VAH-gelisteten, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Die Auswahl und Anwendung geeigneter Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist entsprechend den jeweiligen Herstellerangaben vorzunehmen.

Wiedereinsatz

Der Beistell-Tisch ist für den Wiedereinsatz geeignet. Er ist entsprechend den Anweisungen zu reinigen und zu desinfizieren. Außerdem ist er durch den Fachhandel auf Schäden zu untersuchen und dann für den Wiedereinsatz freizugeben. Fordern Sie unsere Hygiene- und Wartungshinweise an.

Material

- Säule und Fuß: Stahl, pulverbeschichtet
- Tischplatte: Holzplatte kunststoffbeschichtet, mit Kunststoff-Rahmen

Entsorgung

Entsorgen Sie den Beistelltisch nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

Technische Daten

- Maße Tischplatte: 40 x 70 cm • Maße Seitenplatte: 40 x 20 cm
- Gesamtgewicht: 12,5 kg
- Maximale, mittige Belastbarkeit Tischplatte bei waagerechter Positionierung: 15 kg
- Höhenverstellung: 70-105 cm

Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach dem informativen **Ratgeber »Pflege zu Hause«**. Dort lesen Sie Produktinformationen und Anwendungshinweise über weitere Pflegehilfsmittel. Sie finden außerdem praktische und nützliche Tipps für die Pflege im häuslichen Bereich und zum Thema Pflegeversicherung.

Weitere Produkte finden Sie im Internet unter www.russka.de



Stand der Gebrauchsanleitung: 2014-05-27