




Duschhocker DH 49 und DH 49 PA

DH 49



DH 49 PA

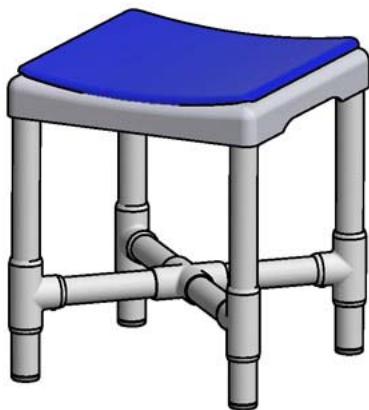

1. Bestimmungsgemäße Verwendung
2. Sicherheitsvorschriften
3. Erste Schritte
4. Bedienung und Funktionen
5. Technische Daten
6. Reinigung und Desinfektion
7. Wartung und Inspektion
8. Entsorgung
9. Garantie

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für die Unterstützung beim Duschvorgang bestimmt. Insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen und / oder Gleichgewichtsstörungen.

Das Produkt darf nur innerhalb von Gebäuden auf ebenen Böden eingesetzt werden.

Produktlebensdauer: Die voraussichtliche Lebensdauer des Produktes beträgt 10 Jahre. Bei einzelnen Komponenten (z. B. Antirutschfüße, Polster) kann je nach

Verschleiß, ein früherer Austausch erforderlich sein.

2. Sicherheitsvorschriften

Nutzen Sie den Hocker nur als Sitzgelegenheit. Benutzen Sie ihn nicht als Steighilfe und kippen Sie ihn während der Benutzung nicht an. Alle vier Füße müssen während der Benutzung Bodenkontakt haben.

3. Erste Schritte


a. Überprüfen Sie den Stuhl auf augenscheinliche Transportschäden. Verwenden Sie ihn nicht, wenn Schäden vorhanden sind. Sollten Sie das Produkt im Winter erhalten und es somit auf dem Transport ggf. Minustemperaturen ausgesetzt gewesen sein, so belasten Sie es solange nicht, bis es Raumtemperatur angenommen hat.

Das Modell ist dauerhaft *belastbar zwischen 0 °C und 60 °C*. Aufgrund der Eigenschaften von Kunststoff können bei Belastung außerhalb dieses Temperaturbereiches Schäden auftreten. Setzen Sie das Produkt auch keinen punktuellen Wärmebelastungen wie z. B. Heizstrahlern aus. Lesen Sie die komplette Gebrauchsanleitung und befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften.


4. Bedienung und Funktionen

An dem Modell können keine Einstellungen vorgenommen werden. Die zentrale Pflegeöffnung ermöglicht das komfortable Reinigen der Intimzone. Nutzen Sie zur Erhöhung des Sitzkomforts die optionale Polsterauflage PA.

5. Technische Daten

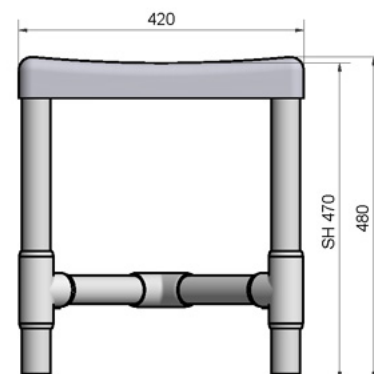

Mit Polsterauflage erhöht sich die Sitzhöhe (SH) um ca. 15 mm.

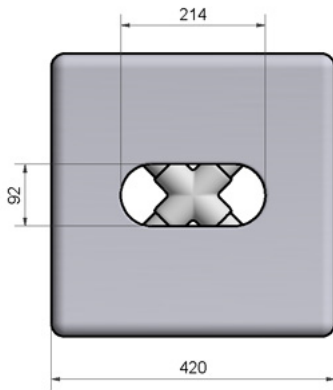

Gewicht DH 49:	3,4 kg
Gewicht DH 49 PA:	4,7 kg
Maximale Belastbarkeit:	200 kg
Sitzhöhe (SH) bestellbar:	300 mm – 590 mm

6. Reinigung und Desinfektion

Das Produkt kann einfach mit warmem Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Achtung: Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel!

Für die Polster aus Polyurethanschaum gilt: Nicht mit scharfen Gegenständen reinigen oder bearbeiten. Nur Reinigungsmittel auf Seifenbasis (basisch) anwenden, Temperatur bis 80 °C. Saure Reinigungsmittel sind nicht geeignet. Eine Liste mit geeigneten farblosen Desinfektionsmitteln kann angefordert werden.

Achtung: Beim Einsatz von Schnelldesinfektionsmitteln darf grundsätzlich während der Einwirkzeit und 20 Minuten danach nicht an den Polstern gerieben werden. Die Polster müssen ggf. vorher von Schmutz befreit werden.

7. Wartung und Inspektion

Das Produkt ist wartungsfrei.

Eine komplette Inspektion ist mindestens einmal jährlich durchzuführen. Hierbei muss der korrekte und feste Sitz der Verbindungen geprüft werden. Ebenso müssen alle Verbindungselemente auf Rissbildungen untersucht werden. Gegebenenfalls muss das Produkt bis nach der Reparatur außer Betrieb genommen werden.

8. Entsorgung

Das Produkt beinhaltet keine gefährlichen Stoffe. Sie können das Produkt der lokalen Entsorgung zuführen.

9. Garantie / Haftung

Für das gelieferte RCN Produkt leisten wir dem Endabnehmer gegenüber Garantie zu den folgenden Bedingungen:

Die Garantiezeit beträgt generell 3 Jahre, für den Kunststoffrahmen beträgt sie 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Benutzer. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg in Verbindung mit der Angabe der auf dem Produkt aufgetragenen Serien-Nummer.

Die Garantie umfasst die Beseitigung der innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel am Produkt, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Hiervon ausgenommen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Wir behalten uns vor, die Garantieleistung durch Austausch oder Reparatur der beschädigten Teile zu erbringen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung und Benutzung, durch Nichtbeachtung der hier enthaltenen Hinweise, bei Verwendung nicht geeigneter oder abrasiver Reinigungsmittel bzw. im Falle mutwilliger Beschädigung.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler/Handelspartner oder direkt an RCN. Falls das Produkt zum Zweck der Reparatur an uns versandt wird, geschieht dies auf Kosten und Gefahr des Absenders.

Berechtigte Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt. Sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Produkt.

Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von nicht am Produkt entstandenen Schäden, sind ausgeschlossen. Diese Garantie besteht zusätzlich und beeinträchtigt in keiner Weise gesetzliche oder andere Rechte von Endverbrauchern.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, Produkte zu entwickeln und herzustellen, die den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich entsprechen. Sagen Sie es uns, wenn Sie meinen, dass wir etwas ändern oder verbessern sollten und wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie uns das auch, denn darüber freuen wir uns natürlich am meisten. Unsere Email-Adresse, Telefonnummer und Faxnummer sowie unsere Postanschrift finden Sie auf der ersten Seite.

Ihr RCN Team