

Gebrauchsanleitung

laguna Eck-Duschhocker

Art.-Nr. 78750 100



Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf! Wird dieses Hilfsmittel von anderen Personen verwendet, müssen diese vor der Benutzung über die hier angegebenen Hinweise vollständig informiert werden.

Indikation/Kontraindikation

Der laguna Eck-Duschhocker findet seine Anwendung im häuslichen Bereich. Er unterstützt Personen mit Bewegungseinschränkungen oder Standunsicherheiten, die durch fehlende Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten nach Verletzungen oder Krankheit verursacht sind, bei der Hygiene in der Dusche. Er fördert die Eigenständigkeit und Sicherheit, weil diese Personen so die Dusche im Sitzen eigenständig nutzen können. Die rutschhemmenden Gummifüße an den drei Stuhlbeinen sorgen für einen sicheren Stand. Bei Nichtgebrauch kann der Duschhocker aufgrund seines geringen Gewichts leicht aus der Dusche entfernt werden. Aufgrund seiner dreieckigen Form ist er auch besonders für kleinere Duschkabinen geeignet.

Der Eck-Duschhocker sollte nicht von Personen mit nicht ausreichend stabiler Rumpfhaltung zum Sitzen bzw. mit nicht ausreichender Restfunktion der oberen Extremitäten verwendet werden.

⚠ Sicherheitshinweise ⚠


- Personen, die schwerer als 150 kg sind, dürfen den Eck-Duschhocker nicht benutzen!
- Personen, die die empfohlene Körpergröße von 145–200 cm unter- bzw. überschreiten, dürfen den Eck-Duschhocker nicht benutzen!
- Die Benutzung des Eck-Duschhockers setzt die Fähigkeit voraus, eigenständig sitzen zu können. Der Eck-Duschhocker darf nicht verwendet werden, wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren!
- Verwenden Sie den Duschhocker nur in einwandfreiem Zustand!
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Duschhocker fest und sicher in der Duschkabine steht und alle 3 Hockerbeine die gleiche Höheneinstellung haben! Vergewissern Sie sich, dass alle Federstifte fest eingerastet sind!
- Ändern Sie die Höheneinstellung nicht, während Sie auf dem Eck-Duschhocker sitzen!
- Lehnen Sie sich nicht zu stark nach vorne, hinten oder zur Seite, während Sie auf dem Duschhocker sitzen, um ein Kippen zu vermeiden!
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor!
- Bitte beachten Sie, dass Ausrutschgefahr beim Hinsetzen und Aufstehen in nassen Duschkabinen besteht - insbesondere, wenn Sie Duschgel oder Seife verwendet haben!
- Benutzen Sie den Duschhocker nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung, nicht aber als Leiterersatz oder Spielgerät!
- Kinder dürfen den Duschhocker nicht unbeaufsichtigt anwenden!

Lieferumfang

1 Sitz, 3 Hockerbeine, 3 Füße, 3 Befestigungsclips.





Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Teilen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

1. Sitz (1x)
2. Hockerbeine (3x)
3. Füße (3x)
4. Befestigungsclips (3x)

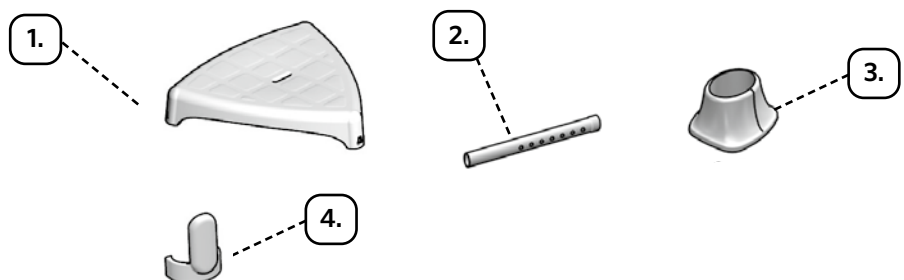

Montage

1. Legen Sie den Sitz mit der Unterseite nach oben zeigend vor sich.
2. Nehmen Sie nacheinander die 3 Hockerbeine und ziehen Sie den inneren Teil des Beines heraus. Dabei rastet der Federstift mit einem deutlich hörbaren Klicken in das erste Loch der Höhenverstellung des Hockerbeines ein (Abb. 1).
3. Stecken Sie nun nacheinander die 3 Hockerbeine in die Aussparungen an den Ecken des Sitzes. Das Loch im Hockerbein zeigt dabei nach außen. Wenn es durch das Loch an der Ecke des Sitzes zu sehen ist, sitzt das Hockerbein richtig.
4. Drücken Sie nun nacheinander die 3 Befestigungsclips in die Löcher an den Ecken des Sitzes (Abb. 2).
5. Setzen Sie nun die 3 FüÙe auf die 3 Hockerbeine. Dann drehen Sie den Hocker um und prüfen, ob alle FüÙe fest sitzen und gerade auf dem Boden aufliegen (Abb. 3).

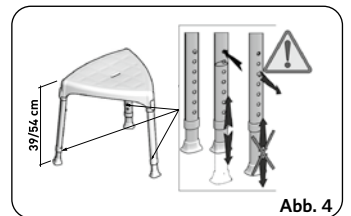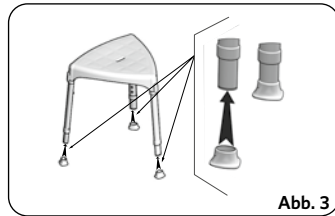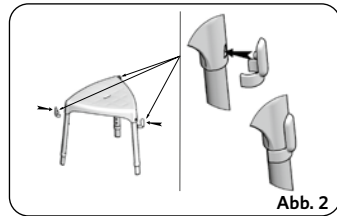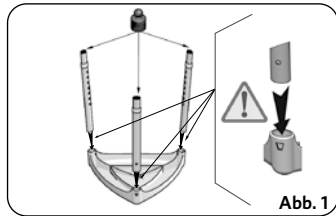

Einstellung der Sitzhöhe:

Der Eck-Duschhocker kann auf 7 Sitzhöhen zwischen 39 und 54 cm eingestellt werden. Drücken Sie für die Einstellung der für Sie passenden Höhe den Federstift hinein und ziehen Sie den inneren Teil des Hockerbeines heraus. Der Federstift rastet mit einem hörbaren Klicken in das nächste Loch der Höhenverstellung. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Hockerbein die gewünschte Höhe hat. Genauso verfahren Sie mit den anderen Hockerbeinen (Abb. 4). Achten Sie darauf, dass alle 3 Beine in derselben Höhe eingestellt sind!

Reinigung/Desinfektion

Für die manuelle Reinigung sind warmes Wasser und ein neutraler Reiniger zu verwenden. Die Desinfektion ist mit einem handelsüblichen, materialverträglichen Flächendesinfektionsmittel durchzuführen. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel!

Material

Alle verwendeten Materialien sind korrosionsfrei bzw. gegen Korrosion geschützt:

- Sitz: Polypropylen mit 30 % Glasfaser
- Hockerbeine: eloxiertes Aluminium
- Federstifte: rostfreier Stahl
- FüÙe: thermoplastisches Gummi
- sonstige Teile: Polypropylen und Polyethylen

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer des Eck-Duschhockers beträgt drei Jahre, bei täglicher Anwendung und Reinigung, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in der Gebrauchsanleitung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es keine Beschädigungen aufweist und sich in einem sicheren Zustand befindet.

Entsorgung

Entsorgen Sie den Duschhocker nicht einfach über den normalen Hausmüll. Fragen Sie vorher Ihr kommunales Entsorgungsunternehmen nach der sach- und umweltgerechten Entsorgung in Ihrer Region.

Technische Daten

- Sitz: 40 x 37 cm (B x T)
- Sitzhöhe: mittig 39–54 cm
- Anzahl Einstellhöhen: 7
- Gewicht: ca. 1,155 kg
- Stellfläche: 50 x 50 cm (bei oberster Sitzeinstellung)
- Empfohlene Körpergröße: 145–200 cm
- Max. Benutzergewicht: 150 kg


MD Dieses Produkt entspricht der Verordnung 2017/745/EU
über Medizinprodukte und trägt eine CE-Kennzeichnung. **CE**

Sollte es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Vorfall kommen,
kontaktieren Sie den Hersteller dieses Produktes sowie die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Deutschland: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM, www.bfarm.de.

Österreich: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen BASG, www.basg.gv.at.

Schweiz: Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, www.swissmedic.ch.

 Hersteller: Ludwig Bertram GmbH, Im Torfstich 7, 30916 Isernhagen, www.russka.de