




Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung.
Bitte lesen Sie vor der Benutzung des Airflo 12 die beiliegende volle
Bedienungsanleitung.




Vor der Nutzung

- 1 Verbinden Sie das Ladegeraet mit dem Ladeanschluss auf der Rueckseite des Airflo 12.

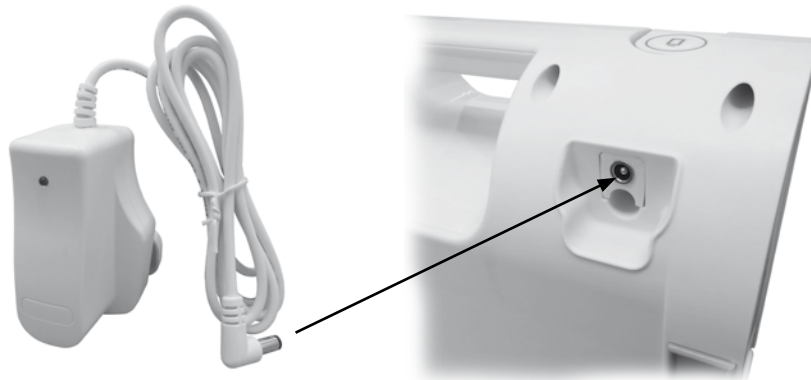


- 2 Laden Sie die Batterie vor der ersten Benutzung 16 Stunden ununterbrochen auf. Die LED-Batterieanzeige wird sich nach und nach auf vier gruene LED's vervollstaendigen (siehe Bild).

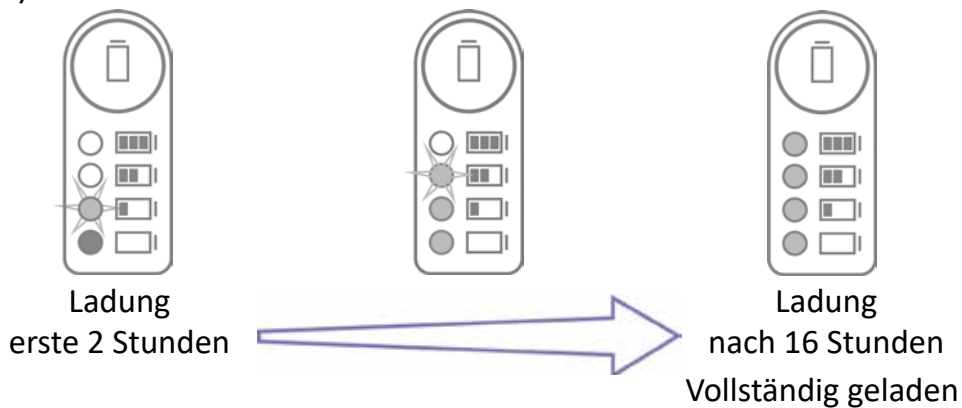



- 3 Trennen Sie das Ladegeraet vom Airflo 12, bevor Sie ihn verwenden.

DRUECKEN SIE KEINESFALLS DEN LADESTAND-STATUSKNOPF OBERHALB DER BATTERIEANZEIGE, WENN DER KOMPRESSOR AN DAS LADEGERAET ANGESCHLOSSEN IST, DA EIN KORREKTES ABLESEN DES LADESTANDS BEI STROMZUFUHR NICHT MOEGlich IST (siehe Seite 2).


Benutzung

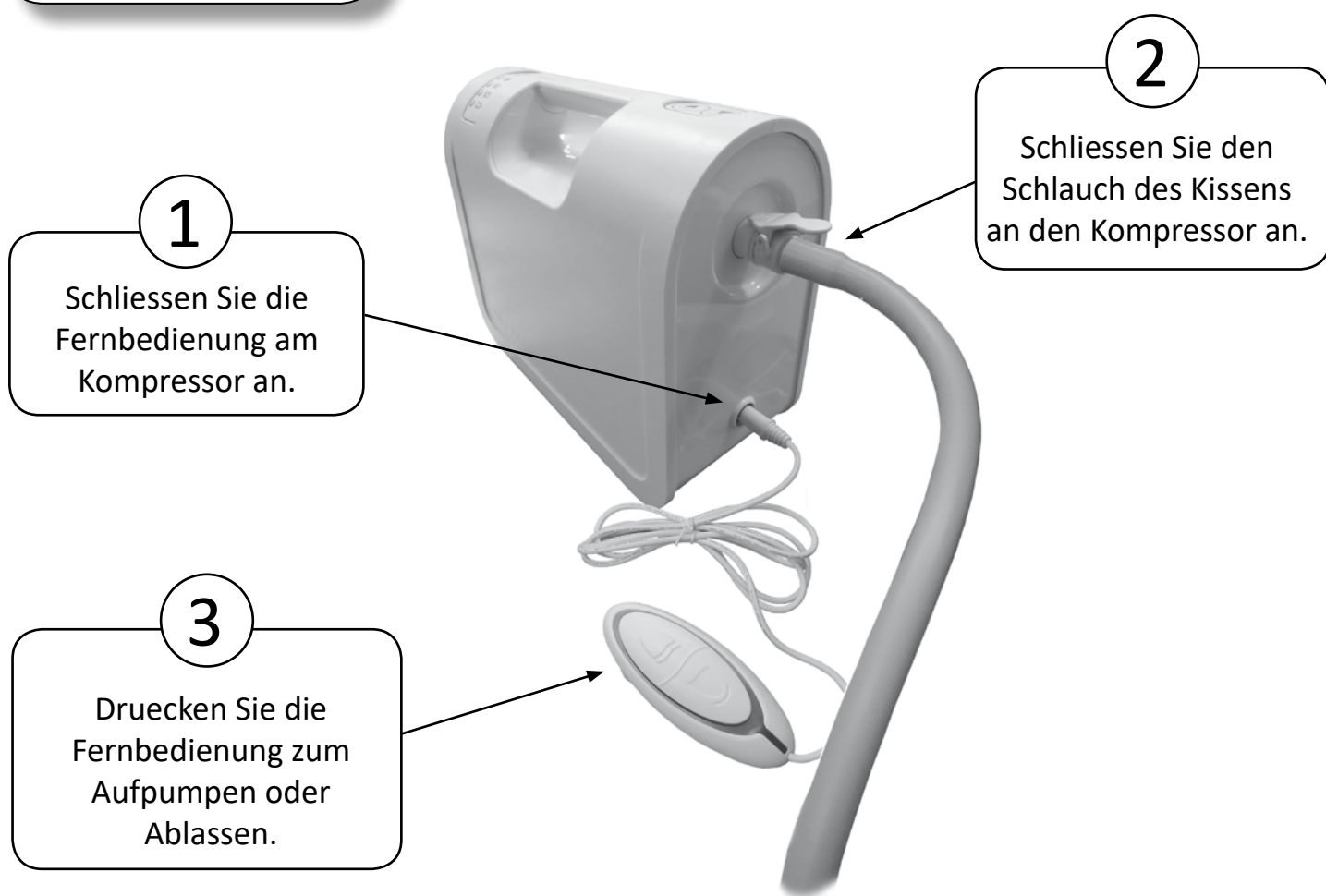


UM DEN JEWELIGEN LADESTAND DER BATTERIE ZU PRUEFEN, MUESSEN SIE DEN KOMPRESSOR VOM LADESTROM TRENNEN. DRUECKEN SIE DEN LADESTAND-STATUSKNOPF, UM DIE LADESTANDSANZEIGE ZU AKTIVIEREN:

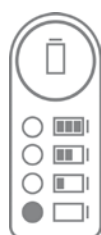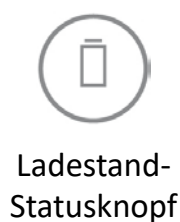

ROT
sofort
aufladen

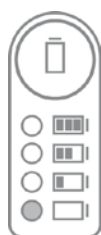


1 GRUEN
vor der naechsten
Nutzung aufladen

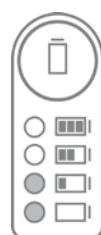

2 GRUEN
bald aufladen



3 GRUEN
in Ordnung

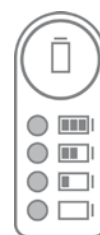

4 GRUEN
in Ordnung

ACHTUNG: Die Batterie muss sofort aufgeladen werden, wenn die rote LED-Anzeige leuchtet. Eine weitere Nutzung des Kompressors mit roter LED kann zu Beschaedigungen der Batterie fuehren.

Mangar Health

Presteigne, Powys, Wales, LD8 2UF, UK

Tel: +44(0)1544 267674

Email: sales@mangarhealth.com

Web: www.mangarhealth.com