

Produktinformation



Ultrana CWC 2000

Geruchsvernichter und Desinfektionsmittelkonzentrat speziell für Urinbeutel, Toilettenstühle und Bettschüsseln

Eigenschaften:

Ultrana CWC 2000 vernichtet alle unangenehmen Gerüche und wirkt Dank seiner desinfizierenden Wirkung keimtötend und selbstreinigend. Ultrana CWC 2000 ist mit positivem Ergebnis dermatologisch getestet und damit auch einsetzbar zum Behandeln von Inkontinenz-Slips. CWC 2000 vernichtet nahezu alle unangenehmen Gerüche damit man sich auch tagsüber sicher fühlt. Es ist formaldehydfrei, biologisch abbaubar, nicht ätzend und somit einfach in der Handhabung.

Anwendung im Toilettenstuhl bzw. Bettschüssel:

Auf 2 Liter Wasser im Toilettenstuhl 7 ml (ca. 2 Spritzer) Ultrana CWC 2000 zugeben und für ca. 48 Stunden unangenehme Gerüche überdecken. Inhalt einer 500 ml Flasche reicht aus für ca. 80 Toilettenstuhlfüllungen.

Anwendung im Urinbeutel:

2 Spritzer (7ml) direkt in den Urinbeutel geben.

Oberflächendesinfektion:

Einfach die zu desinfizierende Fläche einsprühen (6 ml CWC 2000 / m² Fläche), 5 Minuten einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser gründlich abspülen. Achtung, direktes Einatmen der Dämpfe vermeiden!

CWC 2000 wirkt bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten bei niedriger und hoher Belastung bakterizid sowie fungizid (inkl. MRSA). Bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten levurozid gem. DIN EN 13697. CWC 2000 ist geeignet als Sprühdesinfektion für jegliche Oberflächen in medizinischen und öffentlichen Einrichtungen, Arztpraxen und Privathaushalten (OP-Fliesen, ohne Mechanik, geringe Belastung). Zum Desinfizieren von Krankenbetten, Rollstühlen, Türklinken sowie allen sonstigen betroffenen abwaschbaren Oberflächen.

Inhaltstoffe:

Unter 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Limonene.

Wirkstoff: 4,75 g Alkyl(C12-16)benzyltrimethylammoniumchlorid
je 100 g Flüssigkeit.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Verpackungseinheit:

Karton 28 Flaschen a 100 ml

Karton mit 24 Flaschen a 150 ml

Karton mit 16 Flaschen a 500 ml

Karton mit 12 Sprühflaschen a 500 ml



Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Sitz der Gesellschaft:
Rosengartenweg 5
DE-88348 Bad Saulgau - Bogenweiler
Tel: +49 7581 2007 298
Fax: +49 7581 2007 685

Geschäftsführer: Joachim Traub
Handelsregister Ulm HRB 726799
SteuerNr: 81060/06886
www.ultrana.de
Email: info@ultrana.de
Ust.-Ident-Nr.: DE 278287371

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bad Saulgau
KontoNr: 11 80 9000
BLZ: 650 630 86
IBAN: DE76 6506 3086 0008 9330 06
BIC: GENODES1SAG

Ultrana GmbH

Rosengartenweg 5
D-88348 Bad Saulgau

Münster, 22.04.2013

Zertifikat
über das Produkt:
CWC2000


Dermatologische Prüfungen am Menschen 2013

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien keine toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.


Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest[®] GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 4882249 | Fax: +49 251 4902727
www.dermatest.de | info@dermatetest.de

Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss
Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.
BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126040147

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Sitz der Gesellschaft:
Rosengartenweg 5
DE-88348 Bad Saulgau - Bogenweiler
Tel: +49 7581 2007 298
Fax: +49 7581 2007 685

Geschäftsführer: Joachim Traub
Handelsregister Ulm HRB 726799
SteuerNr: 81060/06886
www.ultrana.de
Email: info@ultrana.de
Ust.-Ident-Nr.: DE 278287371

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bad Saulgau
KontoNr: 11 80 9000
BLZ: 650 630 86
IBAN: DE76 6506 3086 0008 9330 06
BIC: GENODES1SAG