

ROLLATORSCHIRM 99 und ROLLATORSCHIRM MONO 99



Plastiktüten können gefährlich sein!

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!

Bitte diese Montage- und Bedienungsanleitung unbedingt vor Montage lesen und beachten !

Montage- und Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise

Vielen Dank und unseren Glückwunsch für Ihre gute Wahl und den Kauf des MPB Rollatorschirmes, dem Original aus Bielefeld. Bevor Sie die Zubehörüte öffnen, lesen Sie bitte die komplette Montage- und Bedienungsanleitung. Wichtig ist auch ein unbedingtes Beachten aller Sicherheitshinweise. Sind Sie genau nach der Montage- und Bedienungsanleitung vorgegangen, können Sie uneingeschränkt auf die beste Qualität und einfachste Handhabung dieses in unserem Hause entwickelten Original-Produktes vertrauen.

Alle Original-MPB-Rollatorschirme schützen Sie optimal vor Regen und Sonne, sie blockieren die schädliche UV-Strahlung nahezu völlig. Das patente Air-Vent-System sorgt für eine weitgehende Entlastung und zusätzliche Stabilität bei windigem Wetter. Mit unserem neuen Montage-Kloben 99 können die MPB-Rollatorschirme an jedem gängigen Rollator oder auch Rollstuhl an senkrechten oder waagerechten Rohren montiert werden. Durch den platzsparenden Anbau vornehmlich am Griffrohr der rechten Seite können Sie Ihren Rollator oder Rollstuhl sicher mit beiden Händen nutzen, ohne dass Sie bei weiteren Zubehören eingeschränkt werden.

Rollatorschirme sind für s.g. Delta-Gehräder nicht geeignet!

Eine Montage des Modells „MONO“ am Rollstuhl vorne (Armlehnen o. Fußstützen) ist konstruktiv leider nicht möglich.

In der Verkaufsverpackung finden Sie: Rollatorschirm mit einem bzw. zwei Verstellgelenken und Schirmhülle (Abb. A), Halterung 99, Montageschellen + Zubehörsatz

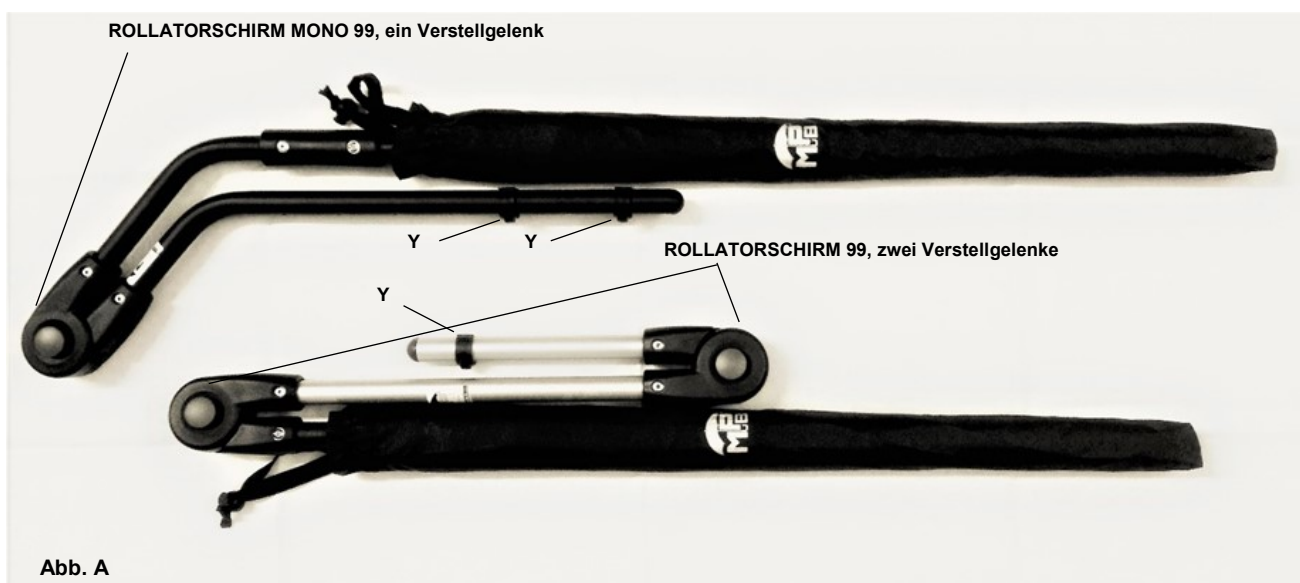


Abb. A

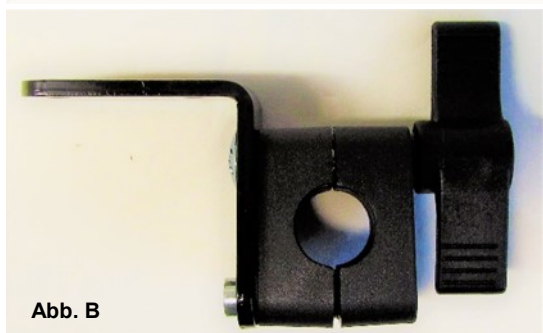


Abb. B

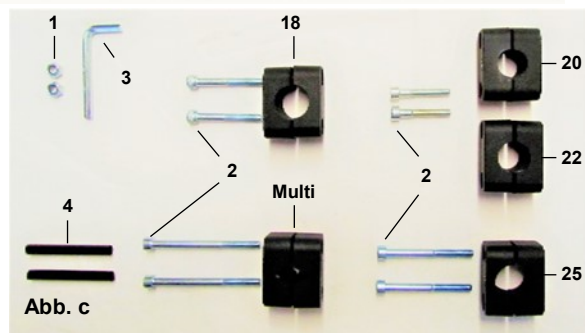


Abb. C

Vormontierter Kloben 99 mit 20 mm-Schelle zur Aufnahme des Schirmgestänges mit Flügelmutter, montiert für Rollatoren mit 7°-Griffrohr (Abb. B)

1. Sicherungsmuttern (Abb.C)
2. Innensechskantschrauben, paarweise M6 x 35, 45, 60 und 75 mm (Abb. C)
3. Innensechskantschlüssel 5mm (Abb. C)
4. Kunststoffröhrchen, schwarz, kürzbar, zum Abdecken der sichtbaren Schraubgewinde (Abb. C)
5. Befestigungsschellen 18, 20, 22, 25 sowie Multischelle für spitze bzw. runde Ovalrohre, z.B. TOPRO (Abb.C)

Der Befestigungskloben 99 (**Abb.1**) ist vormontiert mit einer Schlossschraube mit Vierkant im Befestigungsloch (**h**) und einer Innen-Sechskantschraube mit Flachkopf in Kulissenloch (**b**) und mit einer Schirm-Halteschelle 20 mm in 7°- Position für das rechte Griffrohr (**Abb.2**).

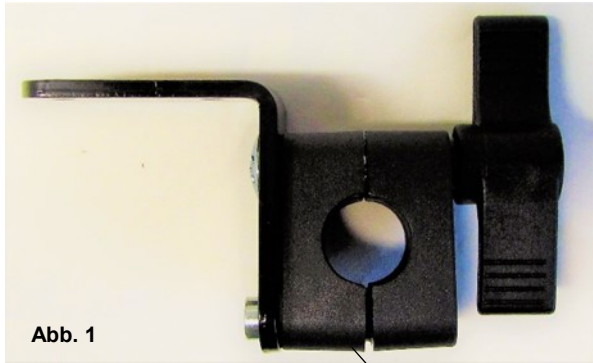


Abb. 1


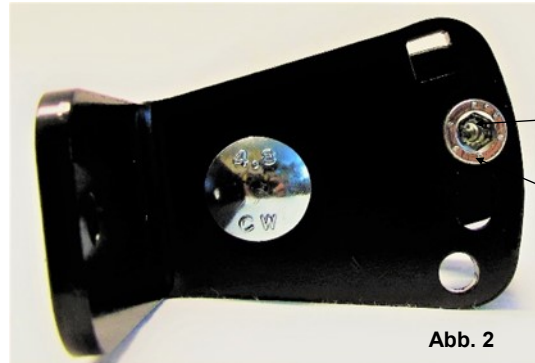


Abb. 2

Kulissenlöcher- und Montage

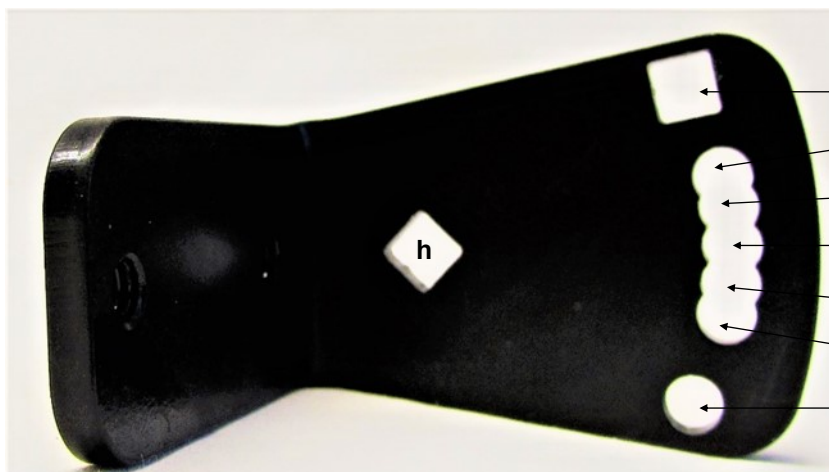

- g**
- a - 12,5°** rechts
- b - 7°** rechts
- c - 0°** rechts und links
- d - 7°** links
- e - 12,5°** links
- f**

Für Griffrohre mit ca. 12,5° versetzen Sie bitte vor der Montage am Rollator die Schraube in das oberste Kulissen-Loch (**a**). Ist das Griffrohr absolut senkrecht, verwenden Sie das mittlere Kulissen-Loch (**c**). Soll der Schirm behinderungsbedingt auf der linken Seite montiert werden, so verwenden Sie dort das Kulissen-Loch (**d**) für die 7°-Position oder das Kulissen-Loch (**e**) für die ca. 12,5°-Position. Bitte beachten Sie, dass zwischen den Halbschellen der Schirmaufnahme unbedingt die Unterlegscheibe (**X**) wieder montiert wird (**Abb.1**).

Durch die beiden Einzellöcher (**f+g**) oberhalb bzw. unterhalb der Kulisse ist die Einstellung eines extremen Winkels von ca. 30° möglich. Diese beiden Löcher dienen aber auch der Aufnahme der Schirm-Halteschelle bei Montage an einem waagerechten Rohr (**Abb. 4**).

Montieren Sie die Aufnahmeschelle mit der Flügelmutter für den Schirm immer an der Außenseite des Rollators oder Rollstuhles.

Wählen Sie entsprechend Ihrem Rollator je nach Form der Griffrohre die am besten passenden Schellen aus. Natürlich können diese beiden Halbschellen auch eine unterschiedliche Form bzw. Größe haben.

Für alle bekannten Rohrdurchmesser und Profile

Senkrechte Montage Abb. 1 - 3

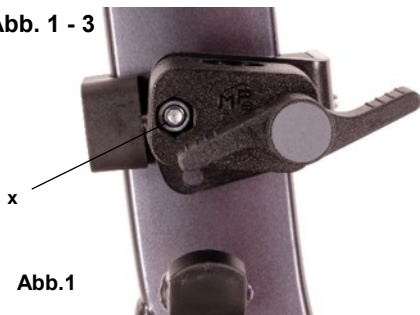


Abb.1

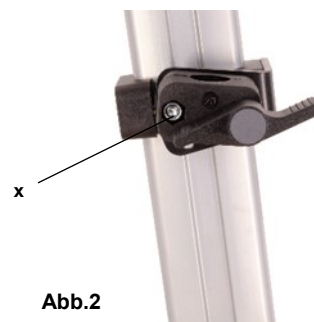


Abb.2



Abb.3

Waagerechte Montage Abb. 4



Abb.4

Montieren Sie dann den Kloben mit Hilfe der längenmäßig am besten passenden Innensechskant-Schrauben so hoch wie möglich unterhalb des Bremsgriffes. Diese sollte bestenfalls min. 2 mm aus dem schwarzen Winkel schauen. Ziehen Sie die Schrauben gut fest und ziehen Sie sie nach ca. 2 Tagen nach. Die sichtbaren Schraubengewinde können Sie mit angepassten schwarzen Kunststoffröhrchen abdecken. Schneiden Sie diese mit einer Schere auf Länge und schlitten Sie sie mit einem scharfen Messer seitlich auf. Danach können Sie diese als Abdeckung über die Schraubengewinde ziehen und abdecken.

Sie können nun den Haltearm mit Schirm in die Schirm-Halterung mit der Flügelmutter einsetzen. Mit dem/den Stelling/en (Y) können sie die von Ihnen gewünschte Höhe einstellen und den Schirm sichern. Durch die lange, einstellbare Aufnahmestange ist eine Nutzung unserer Original-MPB-Schirme auch für Personen mit einer Größe bis zu ca. 200 cm möglich. (Für größere Personen sind höhere Schirme im Sonderbau lieferbar.)


Entfernen Sie die Schutzhülle. Sie können diese ähnlich einer Schleife oberhalb des Verstellgelenks festbinden.


Bringen Sie Ihren in den Kloben eingesetzten Schirm durch Drücken des grauen Arretierungs-Knopfes an dem/den Verstellgelenk(en) in die gewünschte Position. Durch Festziehen der ergonomisch geformten Flügelmutter können Sie Ihren Schirm einfach gegen Verdrehen sichern.


Öffnen Sie die Klettgurte der Schirmbespannung und drücken Sie den Öffnungsknopf des Schirmes. Der Schirm öffnet sehr schnell – bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.


Haben Sie Ihren Schirm benutzt, so rollen sie den zwischenzeitig getrockneten Schirm wieder ein und verfahren Sie ansonsten in umgekehrter Reihenfolge.


Ratschläge, Informationen und Sicherheitshinweise


- 


Der Schirm muss so angebracht werden, dass der Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhles und die Funktion wichtiger Teile wie zum Beispiel der Bremsen nicht eingeschränkt werden.
- 


Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.
- 


Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Bitte halten Sie ihn vom Körper entfernt. Achten Sie auf andere Personen in der Nähe, damit Verletzungen vermieden werden.
- 


Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt Klemmgefahr für die Finger in den Knickgelenken.
- 


Mit einem Rollatorschirm bzw. Rollstuhlschirm sind Sie also „größer“ und „breiter“ als ohne Schirm. Auch wenn der Schirm nur ausgeklappt aber nicht geöffnet ist, sind Sie „größer“. Sichern Sie bei Nichtgebrauch die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und der Schirmhülle.
- 


Jeder Schirm bietet dem Wind eine enorme Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Rollatorschirm bzw. Rollstuhlschirm nicht bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein. Nur so können Unfälle und Verletzungen vermieden werden.
- 

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach in „Trockenübungen“. Beachten Sie bitte, dass Sie mit dem seitlichen Schirmüberstand rechts und links vom Rollator bzw. Rollstuhl hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen oder Vordächern kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.
- 

Nur vollständig getrocknete Schirme einrollen und Schirmhülle überziehen, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.
- 

Verständlicherweise kann die Stoffbespannung mechanisch durch Sträucher, Hecken, Zäune, Zigarettenglut etc. beschädigt werden.
- 

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen vorgenommen werden.
- 

Schützen Sie Ihren trockenen Schirm durch die mitgelieferte Schirmhülle. Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Räder. Für silberbeschichtete Schirme ist die Schirmhülle enorm wichtig, da die silberne Beschichtung empfindlich auf mechanische Einwirkung wie Scheuern, Schleifen etc. reagiert.
- 

Diese Anleitung ist Bestandteil jedes MPB-Rollatorschirmes oder Schirmhalters und muss daher aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.