

Gebrauchsanweisung Toilettensstuhl „TS-0“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung des Toilettensuhls keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Toilettensuhls. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Der Toilettensstuhl wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Toilettensstuhl
- Sitzfläche u. Sitzkissen
- 1 Toiletteneimer mit Deckel
- Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung


Der Toilettensstuhl dient dem Benutzer als Unterstützung wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette auf Grund der Behinderung nicht möglich ist. Die Sitzfläche besteht aus einer wasserfesten, abnehmbaren Platte mit Toilettöffnung, unter der ein Toiletteneimer eingesetzt werden kann.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr Toilettensstuhl unversehrt ist.

- Achten Sie vor jeder Benutzung auf einen festen Stand des Toilettensuhls.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen und Komponenten fest und stabil sind.
- Achten Sie darauf, dass sich alle Stuhlbeine auf gleicher Höhe befinden.
- Achtung! Beim Herunterklappen der Sitzfläche können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Achtung! Bei starker einseitiger Gleichgewichtsverlagerung erhöht sich das Kippisiko.
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Produktbeschreibung

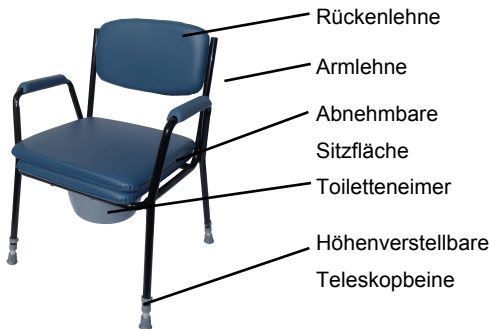

Indikation

Die Verwendung des Toilettensuhls ist angezeigt bei:
 Bei Patienten mit fehlender Rumpfkontrolle
 Personen mit Gleichgewichtsstörung
 Personen mit erheblichen Funktionsausfällen an den unteren Extremitäten
 Deutlich eingeschränkte oder vollständig aufgehobene Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, Hüft- und Kniegelenke
 Lähmungszustände

Kontraindikation

Die Verwendung der Toilettensitzerhöhung ist nicht angezeigt bei Wahrnehmungsstörungen starken Gleichgewichtsstörungen

Höhenverstellung

Die Stuhlbeine sind durch ein Teleskopsystem höhenverstellbar und individuell anpassbar. Ziehen Sie dazu den Clip aus der Bohrung. Bringen Sie das Teleskoprohr in die gewünschte Position. Stecken Sie den Clip in die nächstliegende Bohrung. Gehen Sie bei allen Stuhlbeinen in gleicher Reihenfolge vor. Vergewissern Sie sich, dass alle Stuhlbeine sich auf gleicher Höhe befinden.



Einsetzen des Toiletteneimers

Setzen Sie den Toiletteneimer wie auf der Abbildung dargestellt von oben in die Haltevorrichtung. Vergewissern Sie sich, dass der Eimer fest sitzt.



Benutzungshinweise als Stuhl

Der TS-0 kann auch als normaler Stuhl verwendet werden. Dazu wird die Sitzfläche durch einfachen Kraftaufwand nach oben vom Rahmen ausgeklippt. Entfernen Sie den Toiletteneimer durch Herausheben aus der Haltevorrichtung. Nun kann die Sitzfläche auf dem Rahmen positioniert werden. Sie können die Sitzfläche auch direkt auf die Sitzbrille legen.



Benutzung als Toilettensstuhl

Zur Verwendung als Toilettensstuhl setzen Sie den Eimer ein. Klappen Sie ggf. die Sitzbrille herunter. Entfernen Sie die Sitzfläche. Nach Gebrauch verschließen Sie den Eimer mit dem Deckel und heben Sie ihn vorsichtig zur Reinigung aus der Haltevorrichtung. Der Toilettensstuhl kann auch über WC-Becken verwendet werden. Dazu entfernen Sie den Toiletteneimer und stellen Sie den Stuhl über die Toilettenschüssel.



Reinigung

Der Toilettenstuhl sollte regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Der TS-0 kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Technische Daten

Toilettenstuhl	TS-0
Max. Belastbarkeit (kg)	130
Gewicht (kg)	8
Gesamtbreite (cm)	56
Gesamttiefe (cm)	51
Gesamthöhe (cm)	80 - 95
Sitzbreite (cm)	43
Sitztiefe (cm)	42
Sitzhöhe (cm)	40 - 55
Farbe	blau
Material	ABS, Kunstleder, pulverbeschichtetes Stahlrohr

Wartung

Der Toilettenstuhl ist wartungsfrei konzipiert. Sollte der Toilettenstuhl defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

Trendmobil GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: